

## Система одновременного подключения до семи пациентов к общему источнику газа " E-Vent Case™ Manifold System "

- при происшествиях с большим количеством пострадавших система использует один источник газа
- состоит из трубки и прочного шестиметрового кислородного шланга
- быстро разворачивается в помещениях и на открытых пространствах
- вмещает до 10-ти аппаратов VAR™ (автоматические аппараты ИВЛ компании VORTRAN продаются отдельно)



Система (The E-Vent case™) разработана специально для возможности одновременного подключения нескольких аппаратов VAR к одному источнику газа (кислороду, сжатому воздуху и обогащенному кислородом воздуху). Для более надежной и безопасной эксплуатации на открытых пространствах система оснащена крепкой опорой. Входной канал данного устройства присоединяется к источнику газа посредством шестиметрового (20') кислородного шланга. Давление подаваемого газа устанавливается при помощи регулятора и прибора измерения давления. Все семь выходов оборудованы DISS коннекторами с автоматическим отключением.

Информация для заказа

Каталожный номер

Кол-во в упаковке

E-Vent Case™

EV-4060

1


# Инструкция по установке

Присоединить к источнику газа с давлением на 50 PSIG

1

Подать поток воздуха пациенту 25 л/мин. при помощи прибора измерения давления на 25 PSIG

2

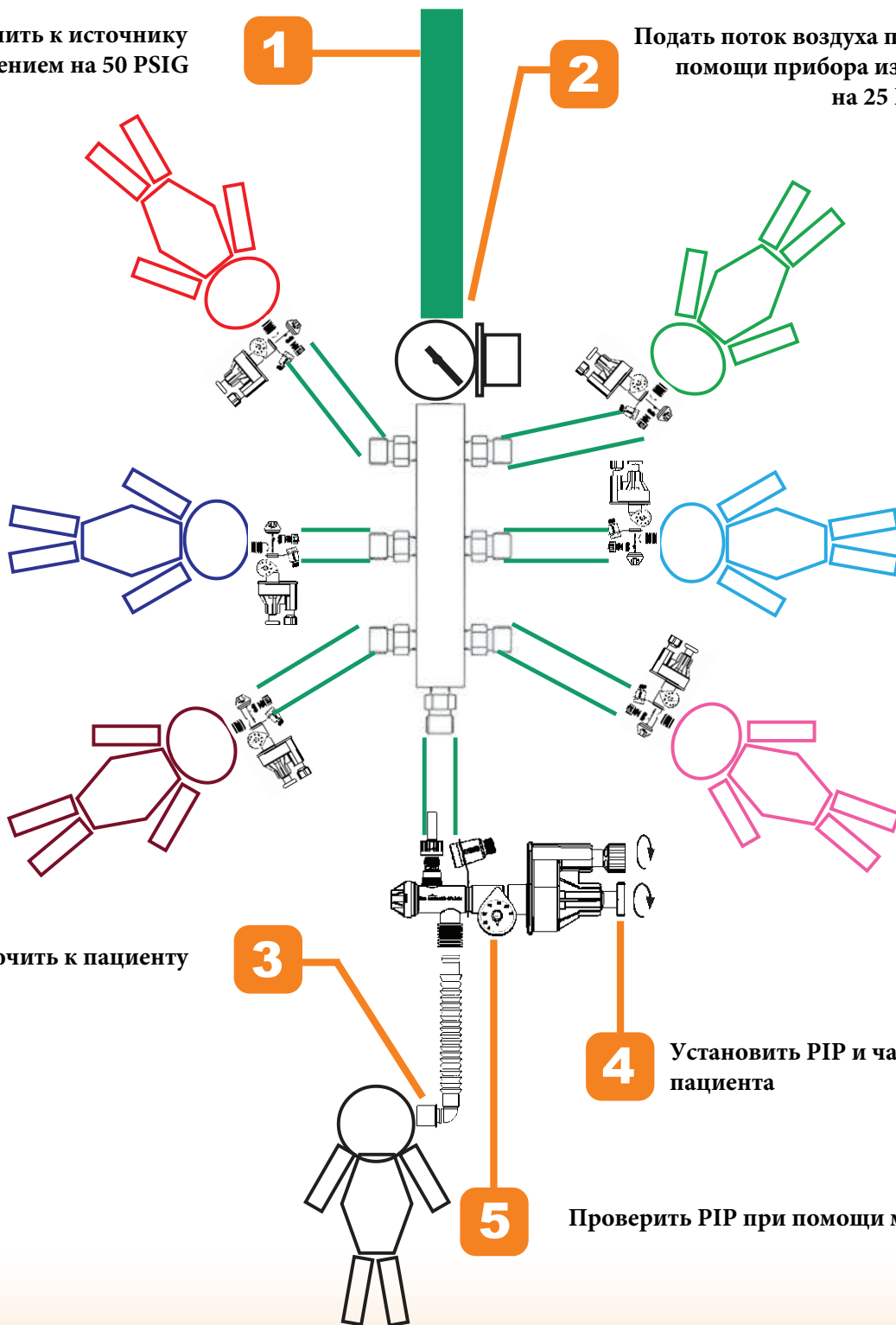

Подключить к пациенту

3

4

Установить PIP и частоту дыхания пациента

5

Проверить PIP при помощи манометра